



# Краткое руководство по применению пульта управления Имплантируемый электростимулятор для обезболивания

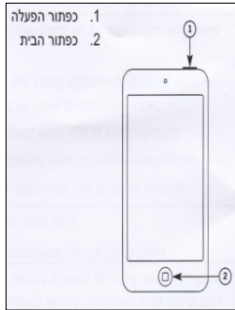

## Применение пульта

1. Нажмите на кнопку включения, находящуюся справа сверху.
2. Нажмите на кнопку Home.

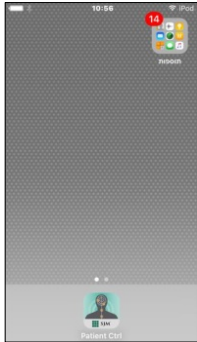


## Выбор приложения

Нажмите на приложение **Patient Ctrl** в нижней части экрана.



## Выбор режима генерации и его включение

Нажмите на строчку EPG, которая появляется на экране.

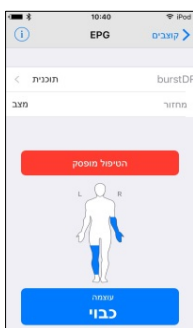

## Включение электрической стимуляции

Нажмите на красную кнопку.  
(Генератор импульсов начнет увеличивать стимуляцию до заданного уровня).

Лечение  
прекращено

## Быстрое включение генератора импульсов ★

Приложите магнит к генератору на 2 секунды, после чего удалите его от тела.



## Прекращение электрической стимуляции

Нажмите на зеленую кнопку.  
(Генерация импульсов прекратится).

Стимуляция  
включена

## Быстрое выключение генератора импульсов ★

Приложите магнит к генератору на 2 секунды, после чего удалите его от тела.




### Настройка интенсивности стимуляции

- Нажмите на экране на кнопку **Интенсивность**
- Регулируйте интенсивность стимуляции нажатием кнопок **-** и **+**
- Чтобы вернуться в главное меню, нажмите «Завершить».



### Изменение интенсивности в определенной зоне

- Нажмите на кнопку **Интенсивность**
- Нажмите на кнопку **Зоны**
- Выберите зону для изменения воздействия.
- Регулируйте интенсивность стимуляции нажатием кнопок **-** и **+**
- Чтобы вернуться в главное меню, нажмите «Завершить».

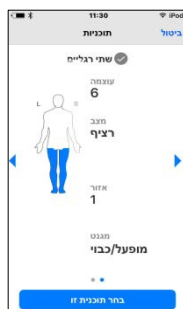

### Смена программы

- Нажмите на строку «Программа».
- При помощи стрелок или пролистывания пальцем направо или налево выберите подходящую программу.
- Для завершения нажмите на кнопку **Выбрать эту программу** (Интенсивность стимуляции автоматически поднимется до заданного уровня).
- ❖ Если вы выставили программу скрытой импульсной стимуляции (BURST), оставьте уровень стимуляции ниже порога чувствительности.

### Предупреждение/ указания

- ✓ Не применяйте систему во время вождения автомобиля.
- ✓ Не совершайте резких движений после имплантации электрода (например, наклоны вперед, боковые растяжки, поднятие рук над головой),
- ✓ так как существует риск смещения электрода и гиперстимуляции. После имплантации постоянного электрода следует избегать резких движений в течение 6-8 недель после этого.
- ✓ Следите, чтобы место имплантации оставалось сухим и чистым. Избегайте попадания воды на повязку после имплантации. Тщательно выполняйте назначения лечащего врача.
- ✓ Проход через рамки металлоискателя воспрещен вследствие риска гиперстимуляции или разрушения системы.
- ✓ **Если вы являетесь кандидатом на операцию по установке имплантируемого нейростимулятора, вам необходимо обратиться к технику компании, чтобы перевести симулятор в безопасный режим.**

### Обращайтесь к лечащему врачу в следующих случаях:

- ✓ При появлении температуры, озноба, гнойных выделений в области имплантации электрода.
- ✓ При отдалении зоны стимуляции от очага боли или при появлении неприятных ощущений.
- ✓ **Если вас направили на МРТ, проконсультируйтесь с лечащим врачом и техником компании, чтобы они утвердили обследование.**

### Обслуживание и техническая поддержка техниками компании:

Надав Абрамсон	052-4830689
Амир Горен	052-2997917
Ади Коэн	052-2302072

### Часы работы: вск. - чт., 8:00 - 16:00

**Medogar Medical Equipment Ltd.**  
 Адрес: 8 Ha-Sadna St. Raanana Industrial Zone  
 Почтовый адрес: POB 2566, Raanana 4365104  
 Тел.: 09-7401457 Факс: 09-7401459  
 Email: info@medogar.co.il

